

4. Pflegeanleitung

Bitte beachten Sie die Anweisungen, bevor das Evakuierungstuch für einen neuen Benutzer verwendet wird. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie die Hygienefachkraft oder kontaktieren Sie den Händler und bitten um weitere Anweisungen.

- Reinigen mit Wasser und einem Flächendesinfektionsmittel .
- Maschinenwäsche bis 90 ° C.
- Beim Waschen, befestigen Sie die Klettverschlüsse aufeinander.
- Trockner bis 70 ° C.
- Jedes Evakuierungstuch ist mit einer Pflegeanleitung beschriftet.

Wichtig: Verwenden Sie keine chlorhaltige Reinigungsmittel.

5. Sonstiges

5.1 Lagerung

Bewahren Sie die Evakuierungstücher in einem trockenen Raum bei Zimmertemperatur auf !

Vermeiden Sie direkte Einwirkung von Sonnenlicht.

5.2 Kennzeichnung

Die Evakuierungstücher sind mit Produktionsdatum, Artikelnummer, Größe, Pflege- und Wäschanweisung und EAN-Barcodes gekennzeichnet

5.3 Gewährleistung

Das Evakuierungstuch hat eine Drei Jahres - Garantie. Die Garantie gilt für Fehler in der Produktion.

5.4 Recycling

Das Evakuierungstuch ist vollständig recyclebar. Eine Demontage ist nicht nötig.

5.5 Retouren und Reklamationen

Beanstandungen müssen unverzüglich an den Lieferanten gemeldet werden. Die Rücksendung einer Lieferung erfolgt nur nach Rücksprache mit dem Hersteller.

Transportschäden müssen sofort dem Transportunternehmen gemeldet werden.

